



Description générale	Pèse-Bébé	
Pièces jointes	Oui	Photo, mode d'emploi
Référence lot	Oui	
Dispositif raccordé	Non	
Dispositif Usage Unique	Non	
Dispositif stérile	Non	
Stérilisation	Non	
Autoclavable	Non	
Nettoyage	Oui	Avec un chiffon sec
Substance impropre	Produit attaquant l'ABS	
Pièces constitutives	Oui	4 piles AA/L R6 1.5 V
Matières	En ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrene)	
Étiquetage	Non	Sur l'emballage : COMED, dénomination, référence, portée, graduation, piles, haute précision, écran LCD, musique, garantie, mémoire, T° ambiante, poids, RoHS, DEEE, CE (directive 2014/30/UE (CEM)), importé par COMED
Emballage	Oui	Dans une boîte en carton à l'unité
Stockage particulier	Non	Sec et propre, entre 10° et 50°C
Marquage sur le DM	Oui	CE, Poids maximum et minimum
Références	45 730 55	
Désignation	Pèse-bébé électronique	
Dimension Lo x la x h (mm)	650 x 360 x 90	
Dimension de l'écran LCD Lo x la (mm)	650 X 40	
Capacité	Max = 20 kg Min = 100 g	
Graduation	5 g	
Unité de poids	KG / LB	
Tolérance	0-5 kg ($\pm 20g$) ; 5-10 kg ($\pm 30g$) ; 10-15 kg ($\pm 40g$) ; 15-20 kg ($\pm 50g$)	
Poids net (g)	2210 g	
Tension d'alimentation	Piles batterie 4 x AA (LR 06)	
Autonomie	Jusqu'à épuisement des piles. Avec indication de batterie faible (Lo)	
Résistance température	10°C et 40°C	
Couleurs	Blanc	
Utilisation	Dispositif permettant de peser un bébé	
Mode d'emploi	Voir mode d'emploi	
Précaution d'emploi	Mettre la balance sur une surface droite et plane. Ne jamais laisser le bébé sans surveillance. Ne pas laisser trop longtemps une charge sur le plateau de pesée. Ne pas cogner, ou laisser tomber un objet dessus. Éviter la surcharge. Remplacer les piles lorsqu'elles sont vides. Ne pas stocker ou utiliser dans un endroit mouillé ou humide. Ne pas entasser divers objets par-dessus. Ne pas immerger dans de l'eau ou quelconque liquide. Ne jamais utiliser la balance dans les locaux à risque d'explosion.	
Recyclage/Récupération	Dans les bacs de déchets pour matériel électrique.	
DEEE/REACH	Oui/ NC	
PVC/ PHTALATES	Non/ Non	
Données de sécurité	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul	