



<i>Description générale</i>	Pèse personne mécanique avec molette de remise à zéro	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo
<i>Référence lot</i>	Non	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	Avec un chiffon humide ou une eau savonneuse, sans nettoyant
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant le plastique	
<i>Matières</i>	Plastique	
<i>Etiquetage</i>	Non	
<i>Emballage</i>	Oui	Dans un carton individuel
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre, température entre -5 et 40 °C
<i>Marquage</i>	Oui	COMED, poids maximum et graduation.
<i>Références</i>	45 610 46	
<i>Désignation</i>	Pèse personne mécanique blanc	
<i>Dimension Lo x la x h (mm)</i>	305x280x50	
<i>Dimension écran (mm)</i>	77 x 44	
<i>Capacité (kg)</i>	130	
<i>Graduation (kg)</i>	1	
<i>Unités</i>	Kg	
<i>Alimentation</i>	Mécanique	
<i>Résistance température (C°)</i>	-5 à 40 °C	
<i>Poids net (Kg)</i>	1.522	
<i>Couleurs</i>	blanc	
<i>Utilisation</i>	Appareil permettant de peser des personnes debout.	
<i>Mode d'emploi</i>	Mettre l'aiguille à zéro à l'aide de la molette. Poser les pieds sur le plateau de la balance en position debout. Lire le poids	
<i>Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique</i>	Ne pas cogner, ou laisser tomber un objet dessus. Éviter la surcharge. Ne pas stocker ou utiliser dans un endroit mouillé ou humide. Ne pas entasser divers objets par-dessus. Ne pas immerger dans de l'eau ou quelconque liquide. Ce pèse personne dénommé de classe IV ne convient pas à un usage médical ou de diagnostic. Il sert uniquement à déterminer un poids de référence par rapport au poids de la propre personne pesée. Une différence peut être constaté avec un autre pèse personne.	
<i>Recyclage</i>	Non	
<i>DEEE/REACH</i>	Non/NC	