

<i>Description générale</i>	Pince césarienne avec mors interchangeable en caoutchouc	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo
<i>Référence lot</i>	Oui	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Oui	
<i>Autoclavable</i>	Oui	Pour la pince (sans les mors) : 134°C pendant 18 min ; Mors autoclavable mais à plus faible température
<i>Nettoyage</i>	Oui	En machine ou à la main avec un produit nettoyant et désinfectant n'attaquant pas l'acier inoxydable, ni le caoutchouc
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant l'acier inoxydable et le caoutchouc (silicone)	
<i>Pièces constitutives</i>	Oui	En deux parties avec un rivet en acier inoxydable + deux mors en caoutchouc (silicone)
<i>Matières</i>	En acier de grade-410 (Carbone : 0.09 à 0.15% ; Manganèse : 1.0% maximum ; Phosphore : 0.040% maximum ; Soufre : 0.030% maximum ; Silicone : 1.0% maximum ; Chrome : 11.50 à 13.50% ; Nickel : 1.0% maximum)	
<i>Standard fabrication</i>	ASTM Standard F899	
<i>Etiquetage</i>	Oui	Nom, matière, taille, référence, CE
<i>Emballage</i>	Oui	Pour la référence CV VF4 70 sachet d'une pince Pour la référence CV VF4 71 sachet d'une paire de mors
<i>Stockage particulier</i>	Non	Sec et propre
<i>Marquage sur le DM</i>	Oui	Sur la pince : Référence, COMED, Matière, lot
<i>Références</i>	CV VF4 70	CV VF4 71
<i>Désignation</i>	Pince césarienne	Mors caoutchouc
<i>Dimensions (mm)</i>	Longueur = 310 Largeur prise en main = 90 Largeur avec mors = 30	Longueur = 50 Largeur = 29 Hauteur = 15
<i>Poids net (g)</i>	203	33
<i>Résistance température (C°)</i>	- 10 à +50°C	
<i>Couleurs</i>	Inox mat	Noir
<i>Utilisation</i>	Dispositif vétérinaire permettant d'écarter et maintenir les tissus du ventre.	
<i>Mode d'emploi</i>		
<i>Précaution d'emploi</i>	Inspecter visuellement la pince si elle n'est pas abîmée (encoche, bord tranchant, usure...). vérifiez que le mouvement de la charnière sois lisse et que le jeu ne sois pas excessif. Le verrouillage devrait se faire automatiquement par action.	
<i>Recyclage/Récupération</i>	Dans les bacs à déchets médicaux	
<i>DEEE/REACH</i>	Non/ NC	
<i>PVC/PHTALATES</i>	Non/ Non	
<i>Données de sécurités</i>	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul	