

DEAMBULATORE COMPACT
COMPACT ROLLATOR
DÉAMBULATEUR COMPACT
ANDADOR COMPACTManuale d'uso - *User's manual* - Mode d'emploi - Manual del usuario**ATTENZIONE:** Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.**ATTENTION:** The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.**AVIS:** Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.**ATENCIÓN:** Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

Le déambulateur est livré avec un sac à bandoulière amovible, des freins de verrouillage et un siège avec dossier rembourré. Les poignées sont réglables en hauteur et le déambulateur se plie facilement pour le transport ou le stockage.

Veillez lire ce mode d'emploi avant de monter ou d'utiliser ce déambulateur et conservez-le dans un endroit sûr.

NE PAS monter ni utiliser ce déambulateur sans avoir au préalable lu et compris ce mode d'emploi.

USAGE PRÉVU

Conçu pour aider l'utilisateur à marcher, se reposer et transporter de petits objets à la maison et à l'extérieur. Il est conçu pour être utilisé sur des surfaces planes par un seul individu à mobilité réduite et ayant un poids maximal, comme indiqué ci-dessous.

L'utilisateur destinataire doit posséder les compétences physiques, visuelles et cognitives nécessaires pour utiliser le déambulateur en toute sécurité. En cas de doute, veuillez consulter votre revendeur / prescripteur.

Il est important que l'utilisateur lise et se familiarise avec les consignes de sécurité données dans ce mode d'emploi avant de tenter d'utiliser le produit. Ce conseil vise à éviter tout risque de blessure pour l'utilisateur ou les tiers, en évitant tout dommage du déambulateur ou du milieu d'utilisation.

MISE EN GARDE: N'utilisez pas le déambulateur pour pousser l'utilisateur qui est assis dessus. Le châssis du déambulateur n'est pas conçu pour cela.

SÉCURITÉ

Le déambulateur peut fournir une assistance à un individu pesant jusqu'à 136 kg (300 lb).

A FAIRE:

- Assurez-vous toujours que les freins sont en position verrouillée si le déambulateur est laissé sans surveillance.
- Vérifiez que toutes les roulettes et les roues sont sécurisées avant toute utilisation
- Vérifiez que les freins fonctionnent correctement
- Vérifiez la hauteur de la poignée, assurez-vous que les molettes manuelles sont bien serrés avant toute utilisation
- Vérifiez que le déambulateur est complètement déplié
- Assurez-vous que le cadre se « verrouille » en position lors du dépliage
- Faites attention lorsque vous transportez le déambulateur qui a été plié
- Gardez vos mains à l'écart du mécanisme de pliage pour éviter tout risque de pincement
- Demandez conseil à un professionnel de la santé pour déterminer si le déambulateur convient à vos besoins.
- Soyez prudent lorsque vous soulevez et transportez le déambulateur

A NE PAS FAIRE :

- Utilisez le déambulateur comme support pour transporter une personne, car il n'est pas conçu comme fauteuil roulant complet.
 - Asseyez-vous sur le déambulateur si les freins ne sont pas verrouillés, cela pourrait faire bouger le déambulateur et causer des blessures à l'utilisateur ou aux passants.
 - Asseyez-vous sur le déambulateur en roulant sur une pente
 - Ne jamais « vous assoir » brusquement dans le siège du déambulateur, et prenez toujours place avec un mouvement doux et contrôlé. Demandez de l'aide si nécessaire
 - N'accrochez pas les objets aux leviers de frein ou aux poignées. Cela pourrait affecter le fonctionnement des freins et / ou la stabilité du déambulateur
 - Évitez de monter sur le déambulateur ou de l'utiliser comme une échelle
-

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Veillez examiner le déambulateur pour déceler tout dommage dû à l'expédition. N'utilisez pas le déambulateur s'il y a des dommages apparents. Contactez votre revendeur pour une réparation et / ou un retour



- A Dossier
- B Freins à poignée verrouillable
- C Poignées réglables en hauteur
- D Siège
- E Sac à bandoulière
- F Goupilles de pliage arrière (2)
- G Molettes de fixation (2)
- H Roues arrière de 8"
- I Roues avant de 8"

1. Retirez tous les emballages. Le déambulateur sera plié comme indiqué à la Figure 1.
 2. Dépliez les roues avant et fixez-les en place à l'aide des molette de fixation comme indiqué à la Figure 2.
 3. Repliez les pieds arrière comme indiqué ci-dessous et fixez-les en place avec les goupilles de pliage arrière, comme illustré à la Figure 3.
 4. Ouvrez le déambulateur, appuyez de chaque côté du siège, comme indiqué sur la Figure 4.
- IMPORTANT:** Les deux côtés doivent « s'encliqueter » pour se mettre en position.
5. Fixez le sac à bandoulière.



1



2



3



4

AJUSTER LA HAUTEUR

Le bon ajustement

Assurez-vous que votre déambulateur est complètement ouvert avant de marcher avec lui et assurez-vous que le déambulateur est verrouillé en place et que le châssis est rigide. Il est important d'ajuster votre déambulateur à une hauteur suffisante pour le tenir confortablement.

1. Avec vos bras reposant sur vos côtés, ajuster le déambulateur de sorte que les poignées soient à la hauteur du poignet.
2. Avec votre main placée sur la poignée, votre coude doit être fléchi de 15 ° à 20 °
3. Si vous devez baisser ou lever vos bras pour atteindre le déambulateur, ajustez les jambes afin de trouver la meilleure hauteur.
4. Appuyez tout simplement sur le bouton à ressort et les ajuster à la hauteur souhaitée. Répétez l'opération sur l'autre côté et assurez-vous que les deux poignées sont bien fixées et réglées à la même hauteur avant toute utilisation.

Hauteur de la poignée : 31,2 "- 36,6" / 79,5 - 93 cm

REMARQUE: Consultez votre médecin ou votre thérapeute pour déterminer le niveau de hauteur approprié.



FONCTIONNEMENT ET RÉGLAGE DU FREIN

1. Tirez sur la poignée de frein pour ralentir le déambulateur.
2. Appuyez sur la poignée de freinage pour verrouiller les roues arrière, tirez sur la poignée de frein pour libérer le verrou (Voir Figure 5).

IMPORTANT: Si le réglage des freins est fait pour permettre une légère pression lors du freinage, le frein pourrait en être affecté une fois verrouillé.

Réglage du frein: Tournez la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la tension, puis verrouillez le réglage en tournant l'écrou de blocage dans le sens des aiguilles d'une montre tout en maintenant la vis de réglage à l'état stationnaire (voir Figure 6).

IMPORTANT: Si le réglage des freins est fait pour permettre une légère pression lors du freinage, le frein pourrait en être affecté une fois verrouillé.

POUR PLIER ET STOCKER LE DÉAMBULATEUR

1. Pliez le déambulateur en tirant sur la sangle située au centre du siège, comme indiqué à la Figure 7.
2. Fermez le déambulateur. Retirez les goupilles pliantes arrière et repliez les roues comme indiqué à la Figure 8.
3. Pour ranger le déambulateur dans le sac de voyage, réduisez la hauteur des poignées au minimum, puis suivez les étapes 1 et 2 décrites ci-dessus. Retirez les molettes de fixation et repliez les roues avant.



5



6



7



8









4. Les roues avant peuvent être rétractées pour un rangement plus compact.

SOINS ET ENTRETIEN

1. Assurez-vous que TOUT le matériel est fixé et sécurisé à tout moment.
2. Vérifiez toutes les roues et roulettes pour déceler d'éventuels boulons lâches, ainsi que des écrous et des molettes desserrées. Vérifiez que les freins fonctionnent correctement et que les poignées sont sécurisées.
3. Remplacez immédiatement tout article cassé, endommagé ou usé.

NETTOYAGE

Le déambulateur peut être nettoyé avec un chiffon humide ou une éponge et de l'eau chaude savonneuse. Des produits de nettoyage ménagers antibactériens peuvent être utilisés si nécessaire. Veillez à ne laisser aucun résidu de nettoyage sur les poignées ou le siège, pour ne pas laisser une surface glissante. N'utilisez pas de tampons à récurer ni de grattoirs, pour éviter d'endommager les revêtements de surface.

	À conserver dans un endroit frais et sec.		Ce produit est conforme à la directive européenne
	Lire et suivre attentivement la notice		Fabricant
	À conserver à l'abri de la lumière du soleil		Lire attentivement la notice
	Code produit		Numéro de lot (voir boîte/sachet)
