

NOTICE DESTINÉE AUX UTILISATEURS

PIEDS A SERUM COMED



COMED SAS
 Parc des Forges - 8 rue Louise Michel
 67200 STRASBOURG - France

☎ : +33(0)3 88 77 13 00

@ : info@comed.fr

Exigence essentielle de la directive 93/42/CEE (§13.1 de l'annexe I) :

« L'emballage de chaque dispositif doit contenir une notice d'instruction. Une exception est faite pour les dispositifs des classes I et IIa, s'ils peuvent être utilisés en toute sécurité sans l'aide de telles instructions. »

UTILISATION :

Suspendre les poches, les paniers porte-sérum ou les flacons à sérum sur les crochets. Régler la hauteur souhaitée par l'intermédiaire du tube coulissant, en le serrant grâce à la molette de réglage. Si nécessaire, bloquer le pied mobile en serrant les 2 roues équipées de freins.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Chaque crochet supporte un poids maximal de 2 Kg. La hauteur maximale de réglage de la tige est de 2100 mm.

Veiller à ce que la surface au sol soit plane ou que l'inclinaison soit inférieure à 5,7° (10% de pente) pour éviter le basculement du pied.

Ce dispositif ne peut être utilisé que par une personne compétente.

Avant utilisation, nettoyer le pied à sérum avec un produit nettoyant-désinfectant adapté au milieu médical (produit en solution, spray ou lingettes pré-imprégnées prêts à l'emploi).

MONTAGE DU PIED A SERUM :

- 1) Enlever le boulon et la rondelle en dessous du tube.
- 2) Insérer le tube avec l'embout noir sur le pied à 5 branches.
- 3) Fixez le tout par l'intermédiaire du boulon en mettant la rondelle en dessous du pied.

